

Original Wiesbadener



Welt-Inhalator

Gebrauchs-Anweisung.

Man fülle mittels des Trichters einen Teil der Flüssigkeit durch die obere Öffnung (Ausströmröhr) in den Glaskörper. Es darf nur so viel eingefüllt werden, daß die beiden seitlichen, unten offenen Saugröhren etwa 1 cm in die Flüssigkeit hineinreichen. Keinesfalls dürfen die oberen Enden der im Glaskörper angebrachten Zerstäuberröhrchen von der Flüssigkeit bedeckt sein, da sonst eine Vernebelung nicht erfolgen kann; außerdem würde die Flüssigkeit durch das mittlere Luftzuführungsrohr in den Gummischlauch dringen und diesen zersetzen. Als dann nehme man den Apparat in die linke Hand und umspanne mit der rechten den birnenförmigen Saugball des Gummigebläses. Durch gleichmäßiges Zusammendrücken und Loslassen dieses Balles wird die Vergasung bewirkt. Es wird so schnell weitergedrückt, daß ein ständiger starker Nebelstrahl entströmt. Man hält nun den Apparat in unmittelbarer Nähe des Mundes und atmet die ausströmenden Gase ein. Will man durch die Nase inhalieren, so stecke man die Nasenolive auf das Ausströmröhr und halte diese in die Nase. Am besten inhaliert man täglich 3 bis 4 mal je 1 bis 5 Minuten, wenn vom Arzt nicht anders bestimmt wird. Nach dem Gebrauch schließe man das Ausströmröhr mit dem beigegebenen Korken. Die Flüssigkeit kann bei täglicher Benutzung im Apparate gelassen werden. Zur Erzielung einer erhöhten Wirkung ist es unbedingt erforderlich, die Inhalations-Flüssigkeit im Glaskörper öfters zu erneuern. Während der kälteren Jahreszeit empfiehlt es sich, die ölhaltigen Flüssigkeiten (wie Katarriosan Nr. 1, Katarriosan Nr. 2, Katarriosan Nr. 3, Katarriosan Nr. 5) vor dem Inhalieren etwas anzuwärmen, indem man den gefüllten Glaskörper etwa 1 Minute an den Ofen oder an die Lampe hält, wodurch die Flüssigkeit dünner wird und sich leichter vernebeln läßt. Reinigung des Apparates (auch bei schwacher Vernebelung). Man füllt den Apparat voll heißes Wasser oder 96% Spiritus und schüttelt ihn mehrmals tüchtig durch. Auch ist es für die gründliche Reinigung erforderlich, den Schlauch des Gebläses auf das Ausströmröhr zu setzen und das Wasser in entgegengesetzter Richtung aus dem Apparat zu treiben, nachdem ist der Apparat gut austrocknen zu lassen. Gummi ist gegen dauernde Einwirkung von Sonnenstrahlen zu schützen, da er sonst brüchig wird.